

Geistlich  
**Bio-Gide®**

L'originale  
conquista la vetta.

2012

1996


Risultati  
di studi a  
lungo termine  
(12-14 anni)<sup>1</sup>

Geistlich Bio-Gide® –  
L'originale



[www.bio-gide.com](http://www.bio-gide.com)




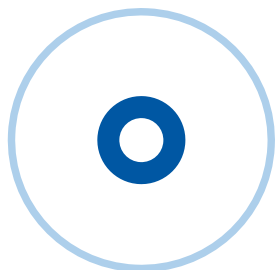

# 2012 risultati clinici a 12-14 anni con Geistlich Bio-Gide® (tecnica GBR)<sup>1</sup>

Tasso di sopravvivenza implantare a lungo termine equivalente con GBR e osso intatto.<sup>1</sup>

Il tasso di sopravvivenza implantare con GBR (Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®) non è significativamente differente da quello di impianti inseriti in osso intatto.<sup>1</sup>

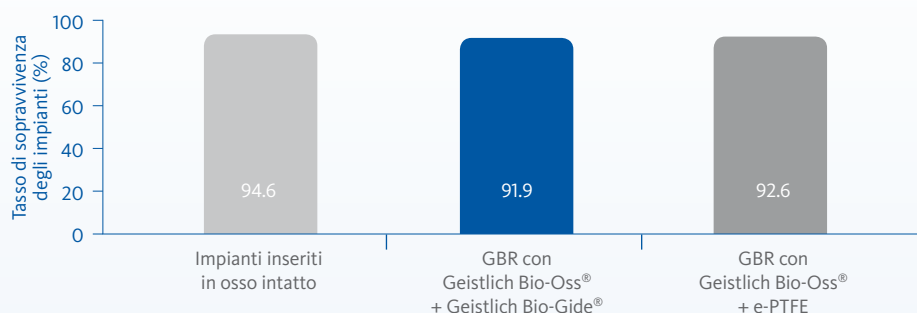

La tecnica GBR considerata nello studio a lungo termine è a tutt'oggi il metodo d'elezione per la GBR<sup>1,9</sup> (caso del Dr. Ramel, Università di Zurigo, Svizzera)



Dopo il posizionamento dell'impianto è visibile una deiscenza ossea vestibolare.



Il difetto viene riempito con Geistlich Bio-Oss® Collagen.




L'innesto viene coperto con Geistlich Bio-Gide®.



Buona guarigione dei tessuti molli e ottimo profilo della cresta quattro mesi dopo l'intervento.

Geistlich Bio-Gide® vs. e-PTFE: stesso successo a lungo termine<sup>1</sup> – meno complicanze<sup>6</sup>

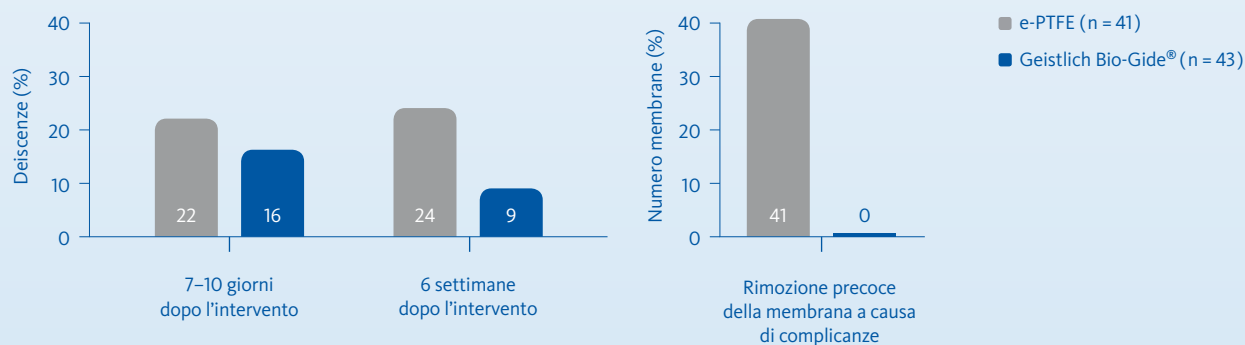

## Bibliografia

- <sup>1</sup> Jung RE et al., Clin. Oral Implants Res. 2012; Jun 15 (Epub ahead of print)
- <sup>2</sup> Becker J et al., Clin. Oral Implants Res. 2009; 20(7):742-749
- <sup>3</sup> Tal H et al., Clin. Oral Implants Res. 2008; 19(3):295-302
- <sup>4</sup> Wallace SS et al., Int J Periodontics Restorative Dent. 2005; 25(6):551-559

<sup>5</sup> Zitzmann NU et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 2001; 16(3):355-66

<sup>6</sup> Zitzmann NU et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 1997; 12(6):844-852

<sup>7</sup> Data on file

<sup>8</sup> Ricerca dei risultati in Pubmed con il termine „Bio-Gide“ (ottobre 2012)

<sup>9</sup> Ramel CF et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Mar-Apr; 27(2):435-441

# L'originale conquista la vetta.

Studi clinici dimostrano che la durata dell'effetto barriera di Geistlich Bio-Gide® è adeguata.<sup>2</sup> **2009**

Minori complicanze con Geistlich Bio-Gide® rispetto alle procedure con membrane cross-linked.<sup>3</sup> **2008**

Maggiore quantità di osso con Geistlich Bio-Gide® rispetto alle procedure senza membrana.<sup>4</sup> **2005**

Primi risultati clinici a 5 anni con Geistlich Bio-Gide®.<sup>5</sup> **2001**

**1997** Meno deiscenze e complicanze con Geistlich Bio-Gide® rispetto al gold standard di questo periodo e-PTFE.<sup>6</sup>

**1996** Geistlich Bio-Gide®: è la prima membrana in collagene nativo per la rigenerazione orale.<sup>7</sup>

**AFFIDABILE:**  
Oltre 16 anni.  
Oltre 190 studi.<sup>8</sup>

## Linea di prodotti



**Geistlich Bio-Gide®**  
Membrana bi-strato riassorbibile

Formati disponibili:  
25 mm x 25 mm  
30 mm x 40 mm



**Geistlich Bio-Gide® Perio**  
Membrana bi-strato riassorbibile  
con dime sterili

Formato disponibile:  
16 mm x 22 mm



**Perio-System Combi-Pack**  
Geistlich Bio-Gide® Perio  
16 x 22 mm  
Geistlich Bio-Oss® Collagen  
100 mg



**Geistlich Bio-Oss®**  
Sostituto osseo spongioso  
Microgranuli 0,25 mm – 1 mm

Formati disponibili:  
0,25 g = 0,5 cc  
0,5 g = 1 cc  
2 g = 4 cc



**Geistlich Bio-Oss®**  
Sostituto osseo spongioso  
Macrogranuli 1 mm – 2 mm

Formati disponibili:  
0,5 g = 1,5 cc  
2 g = 6 cc



**Geistlich Bio-Oss® Collagen**  
Sostituto osseo spongioso  
Blocco preformato con collagene

Formati disponibili:  
100 mg  
250 mg



**Geistlich Combi-Kit Collagen**  
Geistlich Bio-Oss® Collagen  
100 mg  
Geistlich Bio-Gide®  
16 x 22 mm



**Geistlich Bio-Oss Pen®**

Microgranuli: 0,25 mm – 1 mm

Formato:  
0,25 g = 0,5 cc  
0,5 g = 1,0 cc

Macrogranuli: 1 mm – 2 mm

Formato:  
0,5 g = 1,5 cc

swiss made

### Produttore

Geistlich Pharma AG  
CH-6110 Wolhusen  
Tel. +41-414925630  
www.geistlich-pharma.com

### Distribuzione svizzera

Karr Dental AG  
CH-8800 Thalwil  
Tél. +41-44-727 40-00  
fragen@karrdental.ch

### Filiale italiana

Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.  
Via Castelletto, 28  
IT-36016 Thiene VI  
Tel. +39-0445-370890  
Fax +39-0445-370433  
www.geistlich.it

Per maggiori informazioni sui nostri rivenditori:  
www.geistlich-pharma.com/mycontact